



# **CANTELLO** s.r.l.

VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532 - CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.

sito internet: www.cantello.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.cantello.info

INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it



# E SEI IN MANI SICURE!

REFLEXX S.r.I.	NOTA INFORMATIVA	rev. 04 del 28 luglio 2014
Prodotto FEATHER FLEXX PF		
art.23240 Mis. Small – art. 23241 Mis. Medium – art.23242 Mis. Large – art.23243 Mis. X-Large		
Emessa da G.Isetti - Presidente Pag.: 1/3		

# GUANTI MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE

## MARCHIO FEATHER FLEXX PF

#### 1.NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

REFLEXX S.R.L. Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN) Tel. 0375 833164 Fax. 0375 464504

#### 2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO E VARIANTI PREVISTE

	Guanto Monouso in Vinile (PVC) non sterile a cinque dita, ambidestro, trasparente, con bordino arrotolato e superficie liscia.
_	1
	Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Può essere utilizzato per
	usi generici e può venire a contatto con diversi alimenti.
	Unità di Vendita in confezioni da 100 guanti/pz. in scatole di cartoncino teso riciclabile.
	Imballaggi esterni contenenti n° 10 confezioni realizzati con cartone ondulato riciclabile.

# **Imballo**

100		10	
Taglia	Articolo	Taglia	Cartone
23240 S	8008990232403	s	
23241 M	8008990232410	М	
23242 L		L	
23243 XL	8008990232434	XL	

## 3. QUALITÀ E CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI

- □ Come DPI rientra nella I Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE. Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420 e EN 374 1-2
- □ Il prodotto può essere utilizzato con alimenti in quanto certificato secondo la legislazione di riferimento: DPR 777 del 23/08/1982 e DM 108 del 25/01/1992, DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche; direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 93/8/CEE, 97/48/CE; regolamenti (EU) 10/2011, 321/2011, 1282/2011, regolamenti (CE) 1935/2004, 1895/2005,



# E SEI IN MANI SICURE!

REFLEXX S.r.l.	NOTA INFORMATIVA	rev. 04 del 28 luglio 2014
Prodotto FEATHER FLEXX PF		
art.23240 Mis. Small – art. 23241 Mis. Medium – art.23242 Mis. Large – art.23243 Mis. X-Large		
Emessa da G.Isetti - Presidente Pag.: 2/3		

in accordo con la normativa di riferimento: UNI EN 1186 1-15:2003. Per tale utilizzo seguire le avvertenze d'uso.

#### 4. DIMENSIONI E PRESTAZIONI

Dimensioni (in mm.)	1 agna		- Lunghezza	Larghezza
	descrizione taglia	taglia a norma CE	(min.)	(± 5mm)
	S	7	240	85
	M	8	240	95
	L	9	240	105

(i )	Polso (min.)	0,05
Spessore (in mm.)	Palmo (min.)	0,07
	Dita (min.)	0,09

EN 420	Costruzione	conforme
	Misure	conforme
	Indossabilità	conforme
	Destrezza	diametro minimo piolo raccolto 5
		mm

#### 5.AVVERTENZE PER L'USO E LO STOCCAGGIO

- 1. Si raccomanda di leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'utilizzo del guanto
- 2. Si raccomanda di conservare la presente nota informativa per tutta la durata della vita utile del guanto
- 3. Guanto Monouso: DPI: Categoria I di rischio utilizzabile rischi minimi (Direttiva 89/686/CEE)
- 4. In base ai test effettuati il guanto Feather Flexx PF è idoneo al contatto con alimenti acquosi, alcolici (fino al 10%) e acidi, per i quali è previsto l'utilizzo dei simulanti A e B, per 30 minuti a 40°C. Il prodotto non è idoneo al contatto con alimenti lattiero caseari, per i quali è previsto l'utilizzo del simulante D1, e non è idoneo al contatto con alimenti oleosi e grassi, per i quali è previsto l'utilizzo del simulante D2. Il guanto quindi può venire a contatto per esempio con bevande non alcoliche e alcoliche (fino al 10%); frutta intera, fresca o refrigerata, non pelata; ortaggi interi, freschi e refrigerati, non pelati e ortaggi freschi, pelati o in pezzi; crostacei e molluschi freschi nella



# E SEI IN MANI SICURE!

REFLEXX S.r.l. NOTA INFORMATIVA rev. 04 del 28 luglio 2014

## Prodotto FEATHER FLEXX PF

art.23240 Mis. Small – art. 23241 Mis. Medium – art.23242 Mis. Large – art.23243 Mis. X-Large

Emessa da G.Isetti - Presidente

Pag.: 3/3

conchiglia; aceto; salse dal carattere acquoso. In caso di contatto con particolari alimenti e/o in condizioni particolari di utilizzo richiedere al fornitore le informazioni per le specifiche condizioni d'uso.

- 5. Il prodotto non contiene lattice naturale
- 6. Il prodotto non contiene nickel
- 7. Evitare il contatto con agenti aggressivi quali grassi, olii, acidi, idrocarburi, solventi chetonici ed altri aggressivi chimici
- 8. Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo
- 9. Il guanto è un dispositivo soggetto ad usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui visivamente si scorgono imperfezioni. Indossare i guanti sempre con le mani asciutte e pulite e dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani
- 10. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità
- 11. Conservare il prodotto nell'imballaggio originale in luogo asciutto e a temperatura non superiore a 40° C, né inferiore a 10° C
- 12. Evitare l'esposizione alla luce del sole ed a fonti di calore
- 13. La Scadenza è indicata sulla confezione di vendita ed è valida per prodotto debitamente conservato

REFLEXX Sri Via Passeri, 2-46019 MADANA (MN) F.1. e. F. 92085450209 Tel: 0375.833164 - Fax 0375.464504 e-pail: info@reflexx.com



REFLEXX S.p.A.	Dichiarazione di Conformità	rev 00 del 31 gennaio 2018
	Prodotto FEATHER FLEXX PF	
Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico		Pag.: 1/1

# GUANTI MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE

## MARCHIO FEATHER FLEXX PF

La società Reflexx S.p.A., sita in via Passeri, 2 a Viadana (MN), in qualità di Fabbricante, dichiara che il prodotto a margine soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive della Comunità Europea:

Come DPI rientra nella I Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE. Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420, EN 374

In fede

REFLEXX S. A.

Via Passeri, 2 - 46015 11ADANA (MN)
PX. e 5 - 2085 450209

Tel: 0375 833164 - Fax: 0375/464504
e-mail: info@reflexx.com